

Burnaid®

Första Hjälpn vid brännskador

När ska jag använda Burnaid?

Burnaid används till akut behandling av brännskador. Burnaid ger ögonblicklig smärtlindring och kylning. Burnaid minimerar också risken att brännskador sprider sig i vävnaden. Det är inte en produkt för långvarig behandling. Burnaid ger lindring och kylning i upp till 2 timmar.

Hur används Burnaid?

Skölj rikligt med vatten i minst 15-20 minuter om det är möjligt.

Riv upp förpackningen, ta ut kompressen och lägg den på brännsåret. Passa på och välj en kompress som täcker såret och lite av vävnaden runt för att kyla hela området, eftersom en brännskada ofta sprider sig till omkringliggande vävnad.

Låt kompressen ligga på från 15 minuter till 2 timmar. Där vidare behandling krävs, ta bort bandagen och skölj bort gelen med vatten.

Vad är Burnaid?

Burnaid är en gel som består av 90% vatten och ett plantextrakt. Melaleuca alternifolia är antiseptisk, samtidigt som det verkar som en lokalbedövning. När gelen breddes ut på ett brännsår, verkar vattnet kylande och lindrande, medan plantextraktet verkar smärtstillande.

Kan Burnaid hindra infektioner?

Ja. Melaleuca alternifolia är ett effektivt reningsmedel. Mängden av plantextrakt i Burnaid (1%) verkar hämmande på bakterieutvecklingen och bidrar till att hindra infektioner. Men Burnaid har inte blivit utvecklat för att vara starkt bakteriedödande - det är ett medel för ögonblicklig hjälp, inte för långvarig behandling.

Fördelarna med att använda Burnaid istället för kallt vatten?

- A) Det är lätt att använda
- B) Det ger kontinuerlig smärtlindring och
- C) Det minimerar risken för att vävnad blir förstört av för stark nedkylning.

Kompressen är verksam i upp till 2 timmar, och kan användas under transport eller medan patienten väntar på behandling. Vidare har Melaleuca alternifolia en mild lokal-bedövande verkan, något som isvatten inte har. Vidare är Burnaid-kompresserna sterila och det är inte alltid tillfället med vatten.

Tester visar att Burnaid kan förorsaka den mildaste form av ögonirritation. Burnaid gel innehåller ingen gifter. Burnaid innehåller 1% Melaleuca alternifolia-olja. Om patienten får obehag eller visar tecken på allergiska reaktioner, föreslår vi att ta bort bandagen och skölja bort gelen med vatten.

Kan Burnaid användas på barn?

Ja, men använd bara mindre kompresser (10x10) på barn under 5 år. Var uppmärksam på faran för nedkylning. Låt inte bandagen sitta på längre än 20 minuter på små barn - speciellt inte i kyla.

Brännskador med kemikalier

Lägg inte Burnaid direkt på kemikalier som reagerar med vatten, utan att avlägsna kemikalierna först. Om den vattenhaltiga gelen kommer i kontakt med kemikalier som reagerar med vatten, kan skadan förvärras betydligt.

Brännskador vid elektriska stötar

Burnaid-kompresserna får inte läggas på brännskador som är i kontakt med strömförande utrustning. Den vattenhaltiga gelen är mycket strömförande och kan vara direkt livsfarligt för både patienten och räddningspersonal. En skadad som är i kontakt med högspänningsledning får inte röras innan strömmen brutits. Är den skadade i kontakt med lågspänningsledning (hushållsapparater o. dyl.) skall man slå av huvudströmbrytaren, ta ut säkringen eller hugga av strömledningen med en yxa med torrt träskäpp, innan man närmar sig patienten fysiskt.

BRUKSANVISNING:




Riv av förpackningen och ta ut kompressen



Lägg kompressen försiktigt på skadeområdet



Om nödvändigt kan kompressen fästas med gasbinda e.dyl.

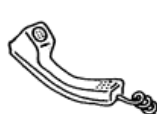

Kontakta läkare om nödvändigt



Kan enkelt sköljas bort

Vid brännskada kontakta alltid läkare eller ring 112

För mer information: www.burnaid.com

Importör: **AlphraMedic** • Tfn: 036-340485 • www.burnaid.se